

Mawell WebViewerin käyttö

TESTI POTILAS, 1.2.2007


TESTI POTILAS, 050505-0505, 1.2.2007 - 3.1001220078560553

NIMI: TESTI POTILAS

HENKILÖTUNNUS: 050505-0505

TUTKIMUSPÄIVÄ: 1.2.2007

AVAINKUVA:



DIAG1: :
DIAG2: :
DIAG3: :

Zoomaus

Linssi

Ikkuna

Muunnokset

Annotaatiot

Video

Zoom 2.08

Alkuperäinen 1:1

Sovita

Kuvanäkymä:

1 kuva

Kohdist:

Sarjaan

Näytä kuvan tiedot

Näytä mitta

Näytä piirrokset

Näytä kokonäyttöllä

Mawell MediMaker

Mawell WebViewer 2.5

Käynnistä

Saapuneet - Micr...

MD-ARIEL - HÄM...

MD-MIRANDA

Microsoft PowerP...

nimetön - Paint

http://atds05:80...

TESTI POTILAS,...

9:43

Perusikkuna, joka aukeaa kuvalinkin klikkauksen jälkeen.

Mawell

Kuvan tarkastelun toiminnot.


Zoomaus: Paina kuvan päällä hiiren oikeaa painiketta ja kuljeta hiirtä vaakasuunnassa oikealle suurentaaksesi kuvaa ja vasemmalle pienentääksesi kuvaa. Alkuperäiseen kokoon pääset kuvaruudun oikeasta laidasta.

Linssi: Klikkaa kuvan päälle, johon ilmestyy suurennuslasi. Linssin suurennosta ja kokoa voi vaihdella kuvaruudun oikeasta laidasta.

Ikkuna: Hiiren vasemmalla painikkeella raahattaessa vaakasuunnassa muuttuu kuvan kontrasti ja pystysuunnassa muuttuu kirkkaus. Alkuperäiseen pääsee oikeasta laidasta.

Muunnokset: Kuvan oikealta puolelta voidaan kääntää kuvaa ja vaihtaa kuvan värejä harmaasävyisiksi tai vastaväreille. Alkuperäisen kuvan saa palautettua samasta valikosta.

Annotaatiot: Merkintöjen tekeminen kuviin tapahtuu oikean laidan napeista. Myös esim. kulmien mittaus onnistuu tätä kautta. Merkintöjen poisto tapahtuu valitsemalla kuvan reuna tarkasti ja painamalla oikean laidan painiketta "Poista valitut". Säilytetyt merkinnät näkyvät muillekin käyttäjille.

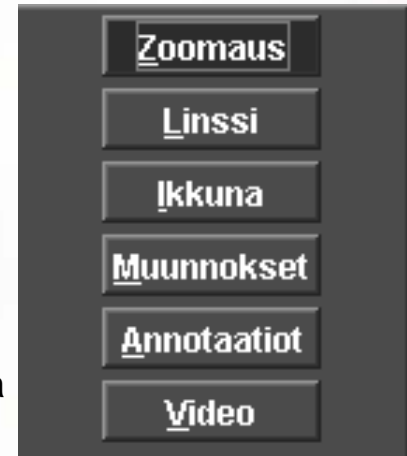

Kuvaikkunan yleisasetukset

Kuvaruudun oikeasta alakulmasta voidaan valita erilaisia näkymiä:

- Kuvanäkymä -kohdasta voidaan valita kerralla näytettävien kuvien määrä. Pienet kuvat raahataan hiiren vasen painike pohjassa suurempiin ruutuihin.
- Kuvan tiedot, mitat ja piirrokset saadaan näkyviin tai poistettua näkyvistä oikean alakulman rukseilla.
- Myös koko näytön käyttäminen on mahdollista tämän valikon kautta. Palautus kokonäytöstä tapahtuu viemällä hiiri näytön oikeaan laitaan ja rastittamalla uudelleen kohta "Näytä kokonäytöllä".

