

## Suu-nenäsuojuksen käyttö

### Tee näin

1. Desinfioi tai pese kätesi saippualla.
2. Peitä sekä nenä että suu.
3. Poista suojus takaapäin kuminauhoista vetämällä.
4. Hävitä käytetty suojus.
5. Toista tarvittaessa kohdasta 1 alkaen.

### Älä tee näin

- Älä jätä nenää tai suuta paljaaksi.
- Älä roikota suojusta kaulalla.
- Älä kosketa suojusta käytön aikana.
- Älä siirrä suojusta kaulalta kasvoille.